

QUELLE TAILLE DE TÉTERELLE ?



De 18 à 20 mm





< 24 mm



De 24 à 28 mm



De 28 à 36 mm

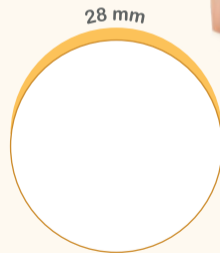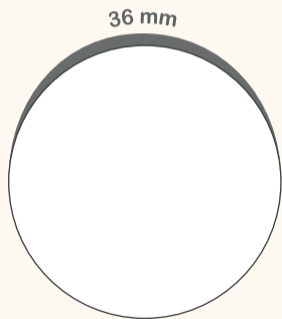


mamivac[®]
france








COMMENT MESURER ?

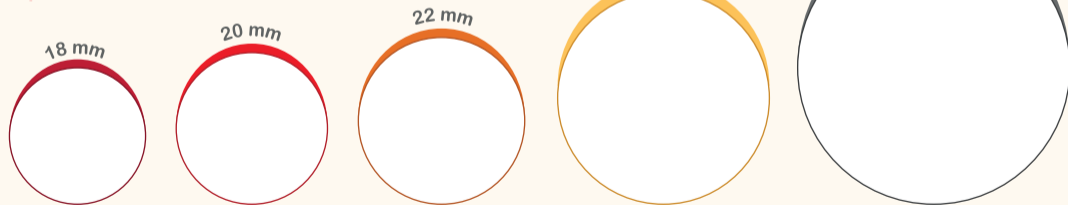Placez les patrons de différentes tailles sur votre mamelon et vérifiez ainsi quelle taille vous convient le mieux.

La taille du bout de sein dépend du mamelon et non de l'aréole. Relaxe-vous avant de faire la mesure. Le mamelon devrait avoir encore un jeu de 2 mm ; si vous avez ce jeu, vous avez trouvé votre taille !



QUELLE TAILLE DE BOUT DE SEIN ?

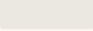 CERISE	Taille S	18 mm
 CERISE	Taille M	22 mm
 CONIQUE	Taille S	18 mm
 CONIQUE	Taille M	20 mm
 CONIQUE	Taille L	28 mm

Si vous avez des questions,
adressez-vous à votre professionnel
de santé.