

mamivac®



CLOCHE NUE S, L, XL



Édition 2019-05
GB1010025FR

CE 0124



KaWeCo GmbH

Gerlinger Str. 36-38

71254 Ditzingen

Germany

Tel.: +49 (0) 71 56 / 1 76 02 - 100

Fax: +49 (0) 71 56 / 1 76 02 - 500

info@kaweco.de

mamivac®.com

Made in Germany



Lisez attentivement le mode d'emploi de votre **cloche nue mamivac®** avant de l'utiliser et conservez le mode d'emploi pour un usage ultérieur.

Contenu


1.	Remarques concernant le mode d'emploi	12
2.	Structure et composants	13
3.	Fonctionnement dans les conditions prévues	13
3.1	Indication	13
3.2	Contre-indications	13
4.	Nettoyage hygiénique et entretien	14
5.	Élimination	14
6.	Pièces de rechange	15
7.	Explication des pictogrammes	15
8.	Garantie légale	15
9.	Comment choisir la taille de cloche nue qui convient ?	15

1. Remarques concernant le mode d'emploi

Le présent mode d'emploi s'applique à toutes les cloches nues des **téterelle PREMIUM mamivac®** ainsi qu'à tous les produits dérivés de construction identique pour l'utilisation avec les tire-lait **mamivac® LACTIVE**, **mamivac® SENSITIVE-C** et **mamivac® SENSITIVE-CFH**.

Cloche nue S	REF 283131
Cloche nue L	REF 283132
Cloche nue XL	REF 283121

2. Structure et composants

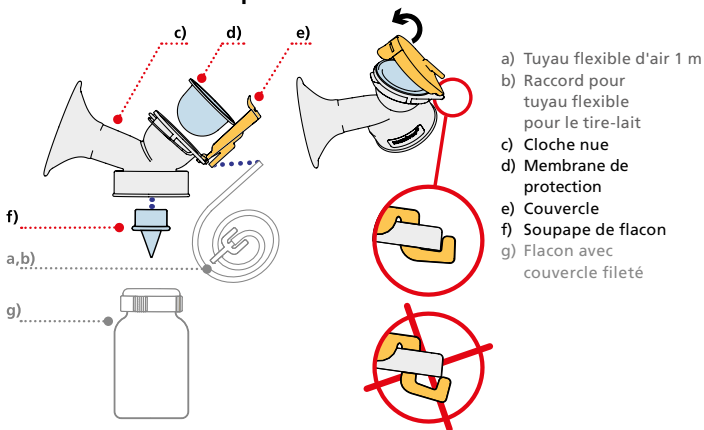

3. Fonctionnement dans les conditions prévues

3.1 Indication

Pour que le tirage soit efficace et confortable, il est très important d'utiliser une cloche nue de la bonne taille. Pour cette raison, les **cloches nues mamivac®** sont disponibles dans les trois tailles S, L et XL (20 mm, 28 mm, 36 mm) pour le **téterelle PREMIUM mamivac®**.

La membrane de protection brevetée intégrée dans la cloche nue est une barrière très efficace contre les germes, donc une réelle sécurité pour la maman et l'enfant. Cette membrane obture hermétiquement le tire-lait. Ni le lait maternel ni les bactéries ni les germes ne peuvent entrer en contact avec les tuyaux flexibles ou la pompe.



Suivez également le mode d'emploi du tire-lait

3.2 Contre-indications

Une contre-indication peut se présenter en cas d'allergie au silicone de l'embout souple optionnel, qui est en contact direct avec la peau. Si vous avez une allergie au silicone, renoncez à l'usage de l'embout en silicone. Dans des cas particuliers, une irritation cutanée (rougeurs, taches rouges) peut se présenter.




Les téterelles mamivac® ne doivent pas être utilisés :

- pour aspirer des fluides corporels autres (sang, sécrétions, mucus, par ex.)
- pour aspirer des produits appartenant à des domaines étrangers à la médecine (liquides corrosifs, combustibles ou explosifs, par ex.)
- sur d'autres êtres vivants

4. Nettoyage hygiénique et entretien

Avant le premier usage, faites bouillir les pièces c)-f) dans l'eau pendant 15 minutes au moins, vous pouvez aussi les laver dans un appareil de désinfection à la vapeur, par ex. dans un vaporisateur. Suivez les indications correspondantes du fabricant.

- N'utilisez en aucun cas des bains de désinfection chimiques, des solvants ou des produits abrasifs.
- Sauf le tuyau flexible d'air et le raccord pour tuyau flexible, toutes les pièces du set de pompage se lavent à la main ou au lave-vaisselle avec des liquides pour la vaisselle en vente dans le commerce.
- Ensuite avant chaque usage, lavez toutes les pièces en contact avec le lait. Il n'est pas nécessaire de nettoyer le tuyau flexible d'air ni le raccord de tuyau flexible. Il suffit d'essuyer ces pièces avec une lingette humide.
- Après le nettoyage, il faut rincer soigneusement les pièces c)-f) à l'eau tiède. De cette manière, vous éliminerez les restes de liquide pour la vaisselle restant sur les pièces, en particulier sur celles qui entreront en contact direct avec le lait maternel. Vous pouvez vous servir éventuellement d'une brosse pour nettoyer les endroits difficiles d'accès.

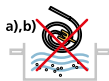

Assurez-vous que la membrane est complètement sèche et en parfait état avant de la remonter (pas de fissures ni de trous ou similaires).

- Montez le set de pompage en suivant le dessin sous »Structure et composants«.

5. Élimination







Les téterelles **mamivac®** doivent être éliminés conformément aux directives locales sur l'élimination de produits de matière synthétique.

6. Pièces de rechange

Membrane de protection de silicone

REF 49054124

7. Explication des pictogrammes

	Observer les consignes de sécurité.		Conserver au sec
	Respecter le mode d'emploi.		Fabricant
	Marquage de conformité selon la directive CE 93/42/CEE		Ne pas exposer aux rayons solaires

8. Garantie légale

En cas de non respect des consignes mentionnées dans ce mode d'emploi ou d'utilisation non conforme, la garantie légale prend fin et KaWeCo décline toute responsabilité quant aux dommages corporels et matériels pouvant en résulter.

9. Comment choisir la taille de cloche nue qui convient ?

Pour une extraction du lait maternel à la fois douce et efficace, il faut qu'une pression soit exercée dans la tétérelle.



Cloche nue taille correcte :

- régulier du mouvement du mamelon correspondant aux intervalles d'extraction
- sensation agréable pendant l'extraction
- tissu mammaire détendu sur toute la surface après l'extraction

Cloche nue trop petite ou grande:

- flux de lait lent et faible quantité de lait
- frottement du mamelon contre le conduit ou aréole dans le conduit
- sensation désagréable pendant l'extraction