


mamivac[®]

 MAMILLOMETER

Finde die richtige Stillhütchen-Größe

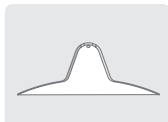

Konisch

S = 18 mm

M = 20 mm






L = 28 mm



Kirschförmig

S = 18 mm



M = 22 mm

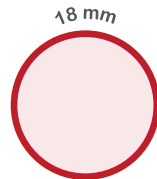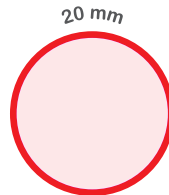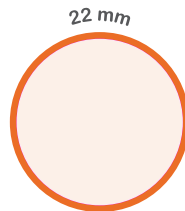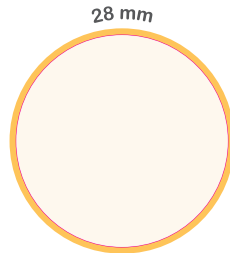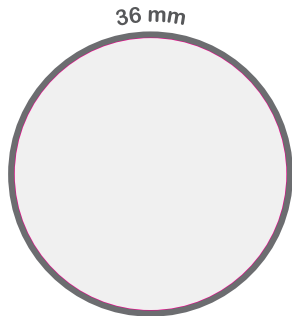

Wie findet man die richtige Größe?

Legen Sie die verschiedenen Stanzgrößen über Ihre Brustwarze und prüfen Sie, welche Größe Sie benötigen.

- Die Größe des Stillhütchens richtet sich nach der Mamille und nicht nach der Areole.
- Führen Sie die Messung in entspannter Atmosphäre durch.
Die Brustwarze sollte ringsum etwa 2 mm Spielraum haben, dann haben Sie das richtige Stillhütchen.
- Bei Unklarheiten hilft Ihnen gerne Ihre Stillberaterin weiter.

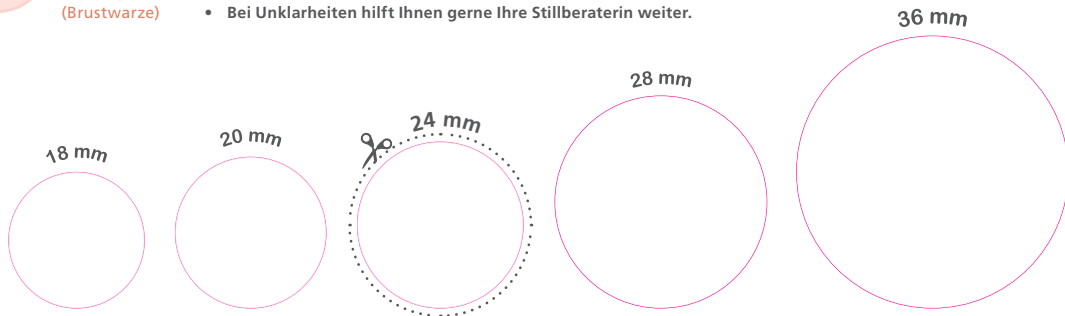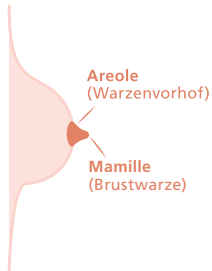

Unsere Brustglocken- und Pumpsetgrößen

